



Airwheel **H3T**

IT Manuale d'uso

Struttura



L'imballaggio contiene:

H3T	1 unità	Ladegerät	1 unità
Istruzioni	1 unità	Accessori	1 set


Istruzioni d'uso per l'utente:

1. Estrarre la scatola degli accessori dal retro della sedia a rotelle

Aprire la scatola della sedia a rotelle, estrarre la sedia e appoggiarla con delicatezza sul pavimento, poi estrarre la scatola degli accessori dal retro della sedia (vedi Immagine 1-1) e rimuovere il cartone vicino al blocco motore. Ruotare il blocco motore in modalità guida (vedi Immagine 1-2). Contenuto della scatola: caricatore, controller, cavalletto posteriore, manuale d'uso, fascette, strumenti di assemblaggio, etc.



1-1

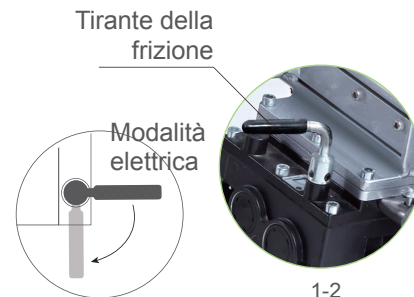

Modalità manuale

1-2

2. Installare il joystick

Il joystick può essere installato sia sul bracciolo sinistro che su quello destro, a seconda delle preferenze personali.

① Fissa il supporto del joystick serrandone bene le viti (vedi Immagine 2-1), ② Inserisci il joystick nel supporto e serra la vite di fissaggio (vedi Immagine 2-2). ③ Collega il cavo e fissalo bene in posizione con gli appositi lacci (vedi Immagine 2-3).



Supporto del joystick

2-1



Montaggio del joystick

2-2

Vite



Cablaggio del joystick

2-3

3. Accendere il mezzo

Dopo aver completato i passaggi precedenti, accendere l'alimentazione. L'interruttore principale di alimentazione e la porta di ricarica si trovano sul retro della scatola della batteria (vedi Immagine 3-1).

Porta di ricarica

Interruttore principale di alimentazione



3-1

4. Aprire la sedia rotelle

Con l'apparecchio spento, tieni premuto per tre secondi il tasto "Su/Estensione" (1) del regolatore (vedi Immagine 4-1). Il pannello del regolatore si illuminerà. Rilascia il tasto al suono della "goccia", e attendi che la sedia a rotelle si apra automaticamente. Una volta che la sedia sia completamente aperta, premi (3) per uscire dalla modalità di apertura e chiusura.

Attiva il tasto di alimentazione (4) e procedi all'uso (vedi Immagine 4-1).

Notes:

Se la sedia a rotelle non riesce a chiudersi automaticamente a causa di una malfunzione elettrica, si prega di usare gli strumenti in dotazione per rimuovere le viti sul retro della sedia a rotelle (vedi Immagine 4-2) per aprirla e chiuderla manualmente.




Installazione ed utilizzo

1. Istruzioni per lo smontaggio della batteria

Prima di rimuovere la custodia della batteria, assicurarsi che l'interruttore di alimentazione principale sia spento. Scollegare il connettore del bus della batteria (come mostrato in vedi Immagine 1-1), premere la clip a molla ed estrarre la custodia della batteria (vedi Immagine 1-2), quando la batteria è installata, inserire la scatola della batteria direttamente finché la clip a molla non scatti nella scatola della batteria, quindi inserire la spina del bus della batteria nella presa del bus della batteria.

Nota: 1. Prestare attenzione alla parte anteriore e posteriore della custodia della batteria e al lato con l'etichetta rivolta verso l'alto.

2. Quando viene inserito e disinserito il bus della batteria, allineare lo slot della scheda con la protrusione. (Come mostrato in vedi Immagine 1-3).

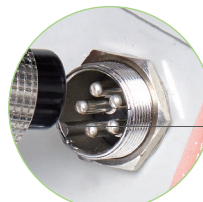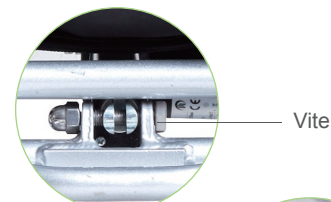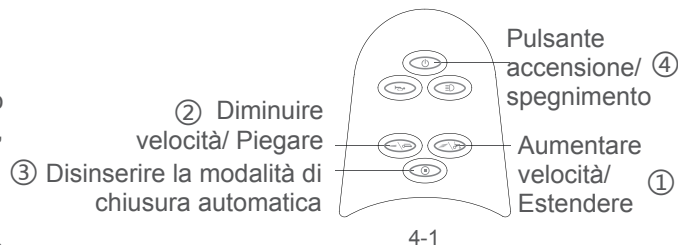

3. Non toccare i cavi di alimentazione e la porta di ricarica con oggetti metallici quando l'interruttore principale della batteria è attivo, per evitare qualsiasi rischio e danno agli accessori.


2. Interruttore di accensione

Quando l'indicatore luminoso è acceso H3T è acceso, diversamente il mezzo che è spento.

Suggerimento: spegnere sempre la batteria quando il mezzo è inutilizzato previene una scarica eccessiva della stessa.

3. Istruzioni per la ricarica della batteria

Si prega di connettere il caricatore alla sedia a rotelle prima di connetterlo alla presa di corrente per caricare il mezzo. Allineare la tacca sul caricatore (vedi Immagine 3-1) con la parte sporgente della porta di ricarica (vedi Immagine 3-2), inserire e stringere il tappo di fissaggio per la connessione. Si prega di allentare il tappo di fissaggio prima di rimuovere il caricatore dalla sedia a rotelle.

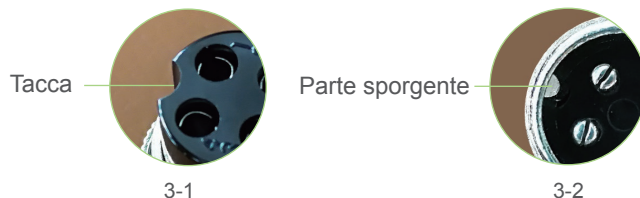

4. Spostare il Joystick sull'Altro Bracciolo (destro o sinistro)

Scollega il cavo del joystick (figura 4-1) e svita il joystick dal suo supporto (vedi Immagine 4-2). Rimuovi il supporto del joystick (vedi Immagine 4-3), ruotato di 180 gradi e montalo sull'altro bracciolo, serrando bene le viti (vedi Immagine 4-4), quindi inserisci il joystick nel supporto. Stringi la vite (vedi Immagine 4-5), ricollega il cavo del joystick, e infine fissa il cavo in posizione con gli appositi lacci (vedi Immagine 4-6).



Attenzione


Non gettare la batteria consumata per non inquinare l'ambiente. La batteria a litio consumata del mezzo deve essere riciclata da personale qualificato nelle modalità previste dalla legge.

Specifiche

Principali parametri tecnici

Dimensioni	1076X620X987mm	Peso mezzo	circa 29.6kg (senza batteria)
Dimensioni chiuso	842X620X420mm (dimensione controller non inclusa)	Carico max	130kg
Raggio di rotazione	1.2m	Struttura	Lega di alluminio 6061
Velocità max. standard	6Km/h	Capacità di salita	circa 9°
Capacità di frenata	≤1.5m	Pendenza	circa 9°
Tempo di ricarica	circa 5 ore	Batteria	litio 25.2V 524Wh
Riduttore	rapporto ingranaggio 1:32	Temperatura applicabile	-15°C ~50°C
Capacità sormontare ostacoli	≥40mm	Capacità di attraversamento	100mm
Ruota anteriore	8 pollici	Ruota posteriore	12.5 pollici, pneumatico gonfiabile
Peso della batteria	3kg		
Motore	Doppio motore brush con frizione per selezionare la modalità di guida desiderata tra trazione manuale e propulsione elettrica. potere: 200W, tensione: 24V, velocità: 4000rpm		
Funzione di chiusura automatica	apertura e chiusura automatica semplicemente premendo un pulsante		

Istruzioni controller

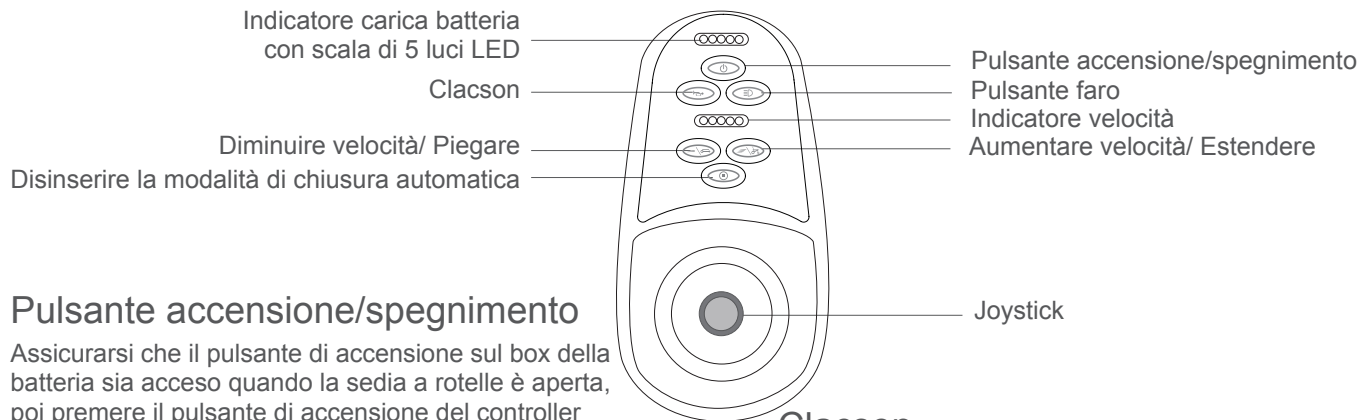

• Pulsante accensione/spegnimento

Assicurarsi che il pulsante di accensione sul box della batteria sia acceso quando la sedia a rotelle è aperta, poi premere il pulsante di accensione del controller per essere pronti a guidare il mezzo. Premerlo di nuovo per spegnere la modalità ready.

Nota: Il pulsante di accensione sul controller non può essere attivato quando la sedia è completamente piegata. Prima di tutto premere il pulsante di accensione del box della batteria, aprire la sedia, e accendere il controller per poter guidare il mezzo.

• Faro anteriore

Assicurarsi che sia il pulsante di accensione del box della batteria che quello del controller siano accesi, poi premere l'interruttore delle luci per accenderle e premerlo nuovamente per spegnerle.

• Clacson

Premere il tasto per suonare il clacson, rilasciare per fermare il suono.

• Diminuire velocità/ Piegare

In modalità spento, tenere premuto il pulsante per 2 secondi, l'H3T entrerà in modalità chiusura/apertura automatica. Rilasciare il pulsante per richiudere i mezzo. In fase di chiusura automatica, premere il pulsante per fermare la chiusura se in fase di chiusura. Quando l'apertura si ferma, premere per richiudere. Nella modalità attiva, modalità controllo remoto e modalità corsa premere il pulsante diminuire la velocità d'andatura.

• Aumentare velocità/ Estendere

In modalità spento, tenere premuto il pulsante per 2 secondi, l'H3T entrerà in modalità chiusura/apertura automatica. Rilasciare il pulsante per estendere il mezzo. Nella modalità chiusura/apertura automatica, premere il pulsante per fermare l'apertura del mezzo se in fase di apertura. Una volta fermata la chiusura, premerlo per aprire il mezzo. Nella modalità attiva, modalità controllo remoto e modalità corsa, premere il bottone per aumentare la velocità d'andatura.

• Indicatore di batteria con scala di 5 luci LED

Mostra la percentuale della capacità residua della batteria. Ogni luce a LED rappresenta il 20% della capacità della batteria. Le spie LED si spengono una dopo l'altra dopo aver consumato il 20% della batteria. Ad esempio, quando due luci LED sono spente significa che il 40% della batteria è già stato consumato. È consigliabile caricare la batteria quando 2 o 3 luci LED sono spente per prolungare la durata della batteria. È vietato guidare la sedia a rotelle quando è accesa una sola luce LED, poiché una scarica eccessiva potrebbe danneggiare la batteria. La precisione dell'indicatore di alimentazione diminuirà con l'uso quotidiano.

• Disinserire la modalità di chiusura automatica

Nella modalità chiusura automatica, premere il pulsante per disinserire la modalità. Il mezzo entrerà in modalità spento.

• Indicatore velocità di andatura

Quando la sedia è pronta per essere guidata, premere l'acceleratore, e le luci LED di indicazione della velocità si accenderanno una ad una; premere il deceleratore e le luci LED di indicazione della velocità si spegneranno una dopo l'altra.

- Shutdown state: the circuit connection is complete, the power switch in the battery pack is turned on. But the on-off button in the control box isn't pressed and the indicator light isn't on. Modalità spento: la connessione dei circuiti è attiva, l'interruttore di accensione posto sulla batteria è acceso. Ma il pulsante on-off del controller non è premuto gli indicatori luminosi posti sul controller non sono accesi.
- Standby state: press the on-off button in the control box, the indicator light will be on, but without any man-made operation. Modalità standby: premere l'interruttore on-off del controller e gli indicatori luminosi posti sul controller si accenderanno automaticamente.
- Riding state: press the on-off button in the control box, the indicator light will be on, and use the operating lever to make it move. Modalità corsa: premere l'interruttore on-off del controller, gli indicatori luminosi si accenderanno automaticamente e attraverso la leva del controller si potrà muovere il mezzo.

Come usare il controller

Attraverso il joystick è possibile controllare i movimenti di H3T, muovendolo in avanti, indietro, destra e sinistra, accelerando, decelerando e frenando.

Dopo aver premuto il pulsante di accensione, spingere la leva in avanti facendo avanzare H3T. Più si spinge la leva e più aumenterà la velocità. Rilasciare la leva per diminuire la velocità. Quando la leva è rilasciata completamente H3T frena e si ferma automaticamente.

Tirare la leva indietro per far indietreggiare H3T. Più si tira la leva e più aumenta la velocità di retromarcia. Rilasciare la leva per diminuire la velocità. Quando la leva è rilasciata completamente H3T frena e si ferma automaticamente.

Analogamente, girare la leva a sinistra o destra per far muovere H3T a sinistra e destra. Spingendo più a sinistra o destra la velocità aumenterà. Rilasciare la leva per rallentare e rilasciarla completamente per frenare e fermare il mezzo.



Avanti:

spingere la leva avanti e H3T



Indietro:

tirare la leva indietro e H3T indietreggerà.



Sinistra:

spingere la leva a sinistra e H3T si muoverà a sinistra.




Destra:

spingere la leva a destra e H3T si muoverà a destra.

Azionare il tirante della frizione

Spostare la leva nella posizione 'aperta', dopodiché il freno di H3T non sarà più attivo e la sedia a rotelle potrà essere spinta manualmente (non importa se H3T è accesa o spenta, sarà possibile farlo in ogni caso). Quando la leva è spostata nella posizione 'chiusa' nessuno potrà spostare manualmente la sedia.

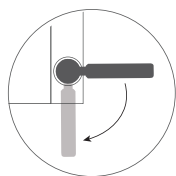

Modalità elettrica

Modalità manuale




Tirante della frizione
Modalità manuale, spostare la leva in senso antiorario per frenare.
Modalità elettrica, spostare la leva in senso orario per frenare.



Modalità elettrica

Modalità manuale

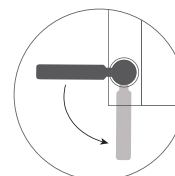

Tirante della frizione
Modalità manuale, spostare la leva in senso orario per frenare.
Modalità elettrica, spostare la leva in senso antiorario per frenare.



La leva della frizione deve essere nella posizione 'modalità elettrica', significa che il freno di H3T è attivo ed è possibile utilizzare il mezzo. Per garantire la sicurezza degli utenti e di H3T è proibiti usare questa funzione quando il mezzo si trova in salita o in discesa.

Gamba di supporto posteriore (opzionale)



8-1

tubo verticale

Pulsante
gamba
posteriore di
supporto

gamba di
supporto
posteriore



8-2



8-3



8-4

Installazione delle gambe:

Tenere premuto il pulsante della gamba posteriore (Figura 8-1), inserire la gamba nel montante (Figura 8-2) e rilasciare il pulsante quando il foro della gamba è allineato il buco del tubo verticale. A questo punto l'installazione è completa.

Smontare la gamba di supporto posteriore: Spingere verso il basso, tenere premuto il pulsante ed estrarre il piede.

Nota: quando la ruota del piedino di supporto posteriore è montata verso il basso, può essere utilizzata come una ruota antiribaltamento (Fig. 6-3), quando la ruota del piedino di supporto posteriore è montata verso l'alto (Figura 8-4), può essere utilizzata come gamba posteriore e supporto posteriore. Vedere l'uso finale (Figura 8-5).

Sicurezza

Si prega di leggere il Manuale d'uso attentamente e seguire le istruzioni di guida. Non usare H3T senza aver prima letto attentamente il Manuale d'uso e aver imparato ad utilizzare il mezzo. Non far usare il mezzo a chi non è in grado di utilizzarlo.

Nota importante:

Serve molta pratica per imparare a manovrare abilmente e in sicurezza H3T. Se non hai le capacità o non sei in grado di seguire il Manuale d'uso di questo prodotto, potresti causare danni a te stesso o ad altri. Airwheel è responsabile per difetti o danni del mezzo, ma non per eventuali danni fisici legati all'uso dei nostri prodotti.

Fare attenzione a quanto segue prima dell'utilizzo:

1. Impara e rispetta le regole del traffico.
2. H3T appartiene alla categoria dei veicoli senza motore, essendo progettato in maniera particolare per anziani e disabili. Non è necessario avere una patente di guida in conformità al codice della strada, ma il pilota di H3T deve seguire le stesse regole della strada previste per i pedoni. Usare H3T nelle zone pedonali o piste ciclabili.
 - ① Imparare tutti i segnali e le indicazioni usati per i pedoni.
 - ② Non cambiare direzione o attraversare la strada all'improvviso quando si utilizza il mezzo.
3. Pratica prima dell'uso. Prima di utilizzare H3T, è opportuno imparare a gestire e utilizzare tutte le funzioni del veicolo. Imparare tutte le operazioni, come avanzare, aumentare e diminuire la velocità, fermarsi, indietreggiare, andare in salita e discesa, cambiare direzione in un luogo tranquillo, con poche persone e buone condizioni di strada. Dopodiché è possibile guidare H3T in totale sicurezza.
4. Se possibile, trovare una persona che sappia già usare H3T per accompagnare l'utente al primo utilizzo del mezzo per garantire la sua sicurezza.


5. Non utilizzare H3T dopo aver bevuto, se si è stanchi o non del tutto lucidi per garantire la sicurezza.
6. Accertarsi che l'utente che utilizzerà H3T non soffra di nessun disturbo mentale o altri disturbi che potrebbero manifestarsi durante la guida e risultare in una guida non sicura del mezzo.
7. Se si sta facendo uso di farmaci, accertarsi che le medicine non abbiano alcun effetto sulla capacità di guida o effetti collaterali indesiderati.
8. Accertarsi che le condizioni del veicolo siano buone prima del suo utilizzo per assicurarsi che i freni e le varie operazioni funzioni correttamente, che il sedile sia ben agganciato e che la batteria abbia carica sufficiente.
9. Non riparare questo H3T autonomamente, pena la decadenza della garanzia se in periodo coperto da garanzia.



- Non esporre mai il sistema elettrico di questo veicolo ad ambienti umidi (come pioggia, neve o nebbia), non lavare il veicolo con l'acqua, poiché potrebbe danneggiarne il sistema elettrico. Se H3T è bagnato, può essere utilizzato solo dopo essere stato asciugato e aver confermato che le sue condizioni siano buone.
- Non utilizzare H3T con condizioni metereologiche ostili, come pioggia, neve, nebbia, vento forte, temperatura inferiore a -20°C o superiore a 40°C. Il sistema elettrico potrebbe danneggiarsi con queste condizioni e causare malfunzionamenti.
- Non utilizzare H3T in spiaggia, strade fangose, strade con pozzanghere, strade ghiacciate, strade troppo lisce o terre saline e alcaline per mantenere le proprietà di guida del veicolo.

Fare attenzione a quanto segue mentre si utilizza il mezzo:

1. H3T è progettato per trasportare una sola persona alla volta.
2. H3T non è pensato per spostare o portare carichi.
3. L'utente deve sedersi sul sedile e usare il joystick per muoversi.
4. Non guidare a zigzag, girare all'improvviso a velocità elevata o sbilanciare il proprio corpo verso un lato per evitare il rischio di ribaltamento.
5. Mantenere la concentrazione e guidare lentamente su strade irregolari o morbide (come ad esempio l'erba), quando si fa una curva, sulle strade con traffico, nei centri commerciali o nei parchi.
6. Non usare apparecchi wireless come il cellulare mentre si guida. Questi apparecchi possono essere usati solo quando si arresta H3T in un luogo sicuro e si spegne il mezzo.
7. Quando si fa retromarcia, fare attenzione alle condizioni della strada e ai pedoni, mantenendo una velocità bassa.
8. Mantenere una velocità bassa quando si esce da una porta o da un ascensore. Non è permesso andare sulle scale mobili con H3T.
9. Rimane concentrati, allacciare la cintura di sicurezza e guidare a una velocità bassa quando si percorrono strade in salita o in discesa. Non è permesso usare H3T in strade che superano i limiti di pendenza di questo veicolo.
10. Non superare il grado di pendenza di 5° ad alta velocità.
11. Non superare ostacoli o gradini più alti di 4cm, perché potrebbero impedire a H3T di procedere. In questo caso, passare alla modalità manuale immediatamente.
12. Non superare spazi vuoti più ampi di 10cm. Mantenere una velocità costante quando si supera uno spazio vuoto inferiore ai 10cm.
13. Seguire il codice della strada quando si attraversa una strada e non passare quando il semaforo è rosso. Quando si attraversa un passaggio a livello, fermarsi e controllare le condizioni del traffico, e poi passare i binari mantenendo una velocità bassa, perpendicolarmente ai binari per evitare di rimanere incastrati nello spazio tra le traversine.
14. Non chiudere a aprire con eccessiva frequenza H3T.
15. Non prestare H3T a nessuno che non abbia dimestichezza con il mezzo o non abbia mai usato il mezzo. Non lasciare i bambini giocare con il joystick o la presa elettrica.
16. Non utilizzare il mezzo con un carico eccessivo (maggiore di 130kg).

 Quando si rilascia la leva del joystick mentre si guida e la leva è tornata in posizione centrale ma H3T non si ferma, bloccare il prima possibile la presa elettrica e contattare il rivenditore più vicino.

Fare attenzione a quanto segue dopo l'utilizzo del mezzo:

1. Se non si utilizzerà H3T per più di 48 ore, si prega di spegnere l'interruttore di alimentazione.
2. Quando si trasporta H3T su altri mezzi, si prega di controllare che la batteria sia ben fissata.

Utilizzo della batteria:

1. Ricarica ausiliaria: se il tempo di trasporto è corto, si può utilizzare direttamente il mezzo. Se il tempo di trasporto è lungo (2 mesi o di più), la batteria avrà una normale perdita di carica mentre è in magazzino e durante il trasporto. È consigliabile quindi ricaricare la batteria prima dell'utilizzo di H3T. Per ricaricare la batteria è necessario inserire il caricatore alla porta apposita in modo da connettere AC100-240V alla sorgente di energia per 5 ore fino alla completa carica della batteria.
Ricarica normale: l'utilizzo di H3T comporta lo scarico della batteria. La batteria deve essere ricaricata immediatamente dopo
2. l'utilizzo del mezzo. Si prega di spegnere l'alimentazione quando non si utilizza il mezzo.
I connettori della batteria devono essere fissati saldamente secondo i requisiti (i collegamenti della batteria sono già stati connessi
3. precedentemente in maniera affidabile in fabbrica). Collegamenti allentati o sbagliati causeranno il malfunzionamento delle parti collegate, provocando danni gravi.
4. La batteria a litio non può stare vicino al fuoco o a fonti di calore ad alta temperatura, non può essere gettata in acqua ed è meglio evitare l'eccessiva esposizione al sole nelle stagioni con alte temperature.
5. Non smontare e scomporre la batteria, poiché le parti interne di litio della batteria sono state assemblate integralmente.
6. La batteria a litio consumata deve essere riciclata dall'azienda o dal rivenditore. Si prega di non gettare la batteria, per non inquinare l'ambiente.

Uso del caricabatteria:

1. Controllare con attenzione la tensione nominale di ingresso del caricabatteria (AC100-240V) e che la tensione di corrente sia costante.
2. Quando è necessario caricare il veicolo, per prima cosa connettere la batteria al caricatore e poi connettere il caricatore alla presa di corrente. L'indicatore di carica rosso indica che la batteria si sta caricando. Quando la luce diventa verde, aspettare 15 minuti affinché la batteria sia completamente carica. Il tempo di ricarica è di circa 2-4 ore (a seconda dalla quantità di batteria rimasta).

Prestare attenzione quando si carica il mezzo:

1. Quando si carica, lasciare il mezzo in un posto sicuro lontano dalla portata dei bambini.
2. Non è consigliabile usare il mezzo quando non è caricato completamente.
3. Non usare caricabatteria di altri marchi, o altri marchi di batterie poiché potrebbero non essere compatibili con il caricabatteria.
4. Non smontare il caricatore, poiché contiene circuiti ad alto voltaggio.
5. Evitare che particelle liquide o metalliche penetrino all'interno e fare attenzione a non far cadere o colpire il caricabatteria, per non causare danni durante l'uso e il deposito.
6. Quando si carica il mezzo, non attaccare nessun altro oggetto.
7. È necessario ricaricare il mezzo completamente e spegnerlo prima di riporlo. Ricaricarlo almeno una volta ogni 3 mesi.

Come guidare questo H3T:

1. Il pilota dovrebbe allacciare la cintura di sicurezza dopo essersi seduto sul mezzo.
2. Premere il pulsante di accensione e il display con l'indicatore di batteria a 5 scale si accenderà o lampeggerà lentamente. Spingere lentamente la leva del joystick in avanti fino a sentire il rumore del freno elettromagnetico. A questo punto, l'H3T dovrebbe muoversi in avanti. Analogamente, sposta la leva indietro, a sinistra o a destra e l'H3T si muoverà indietro, a sinistra e a destra.
4. Regolare la velocità di andatura attraverso l'apposito pulsante, a seconda delle condizioni della strada, dell'ambiente e delle preferenze personali.
5. Quando ci si vuole fermare, rilasciare la leva del joystick che si posizionerà al centro. A questo punto si sentirà un suono elettromagnetico a indicare che l'H3T sta frenando.
6. Fare attenzione alle condizioni circostanti quando si fa la retromarcia. Tirare lentamente indietro la leva del joystick e l'H3T inizierà ad indietreggiare.

Airwheel si riserva il diritto dell'interpretazione finale di tutti i termini e le condizioni di questo Manuale d'uso.

precauzioni per i corrimani



8-1



8-2



8-3



8-4

- Premere e tenere premuto il pulsante del bracciolo (vedi figura 8-1) allo stesso tempo tirare il bracciolo verso 90° in su (vedi figura 8-2)

- Reseta il bracciolo e completa la fissazione (vedi Figura 8-3), che corrisponde allo stato di uso normale.


Zaino (opzionale)



I quattro angoli in Velcro sono agganciati alla struttura (vedo figura) e può essere rimosso facilmente.



Telecomando Bluetooth (opzionale)

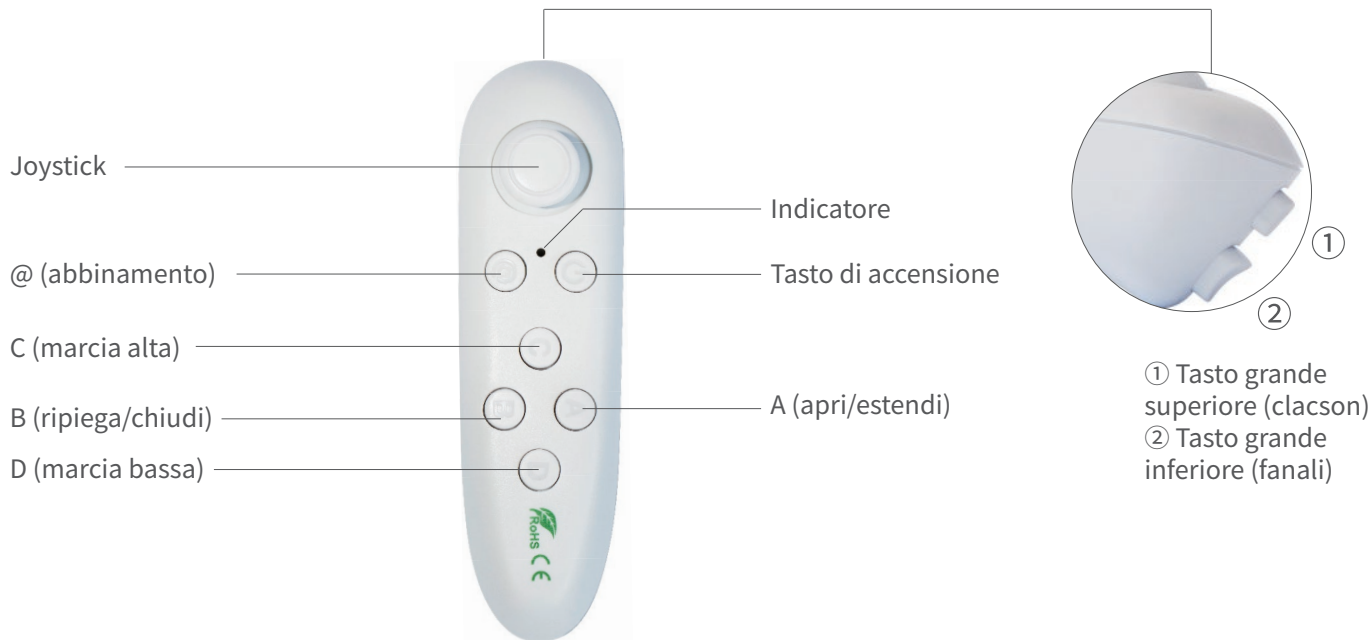

Abbinamento del Telecomando Bluetooth

1. Inserisci le batterie di tipo AAA e accendi, la luce verde lampeggerà una volta;
2. Avvicina il telecomando ad almeno un metro di distanza dalla sedia a rotelle, premi il tasto di accensione, e la luce verde rimarrà accesa. Premi il tasto “@”, la luce verde lampeggerà lentamente a confermare che l’ abbinamento è in corso (non azionare il joystick durante l’ abbinamento);

3. Ad abbinamento eseguito, la luce verde lampeggerà velocemente. Trascorsi alcuni secondi, attiva la sedia a rotelle ed entra in modalità telecomando. La spia del telecomando cesserà di lampeggiare, resterà accesa per 0,5” per poi spegnersi.

Come Usare il Telecomando Bluetooth

1. Premi il joystick, per controllare la sedia a rotelle, facendola partire, fermare e girare, e la spia del telecomando si spegnerà. Premi il “tasto grande superiore” per suonare il clacson, e premi il “tasto grande inferiore” per accendere i fanali. La luce verde lampeggia una volta ogni cinque secondi quando si è in modalità telecomando.
2. Premi il pulsante “C”, per avanzare alla velocità massima (5) e premi il tasto “D” per passare alla velocità inferiore (2).
3. Premi o tieni premuto e rilascia il “tasto di accensione”, la spia del joystick della sedia a rotelle si spegnerà, quindi premi o tieni premuto e rilascia il “tasto di accensione”, la sedia a rotelle si accenderà automaticamente entro 3~5 secondi;
4. Dopo i passaggi precedenti, premi o tieni premuto e rilascia il “tasto di accensione” per spegnere la sedia a rotelle. Tieni premuto il tasto “B” per ripiegare la sedia a rotelle, quindi rilascialo e premi brevemente lo stesso tasto “B” per interrompere la chiusura. Premi “A” per aprire la sedia a rotelle. Una volta che la sedia sia completamente aperta, premi il tasto “@” per uscire dalla modalità pieghevole. Il joystick e la spia si spegneranno.

Indicatore del Telecomando Bluetooth

1. Premi o tieni premuto e rilascia il “tasto di accensione” per attivare la sedia a rotelle. Tieni premuto per alcuni secondi il tasto “@” e la luce rossa lampeggerà una volta. Esci dalla modalità telecomando e passa alla modalità standby. Premi il “tasto di accensione”, il telecomando si riattiverà, la luce verde lampeggerà rapidamente, il telecomando si collegherà automaticamente alla sedia a rotelle dopo alcuni secondi e la sedia a rotelle si attiverà automaticamente.
2. Dopo l’ attivazione, premi e rilascia il tasto Bluetooth del telecomando. Dopo circa due minuti il telecomando entrerà automaticamente in modalità standby e la luce rossa lampeggerà una volta.
3. Se la tensione della batteria del telecomando Bluetooth dovesse scendere sotto i 2,1V, la luce rossa continuerà a lampeggiare.

App download (opzionale)




Scansionare il QR code per scaricare l'App


*valida per Android 4.3 e superiori, iOS 7.0 e superiori


APP istruzioni

1. Accendere H3T con il pulsante di accensione, aprire l'App e attivare il Bluetooth.
2. Cliccare il pulsante di ricerca e seguire le istruzioni che seguono (password di verifica: 11111111).
3. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web ufficiale o chiamare.

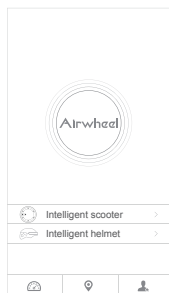


Cliccare su 'Scooter intelligente autobilanciante'.

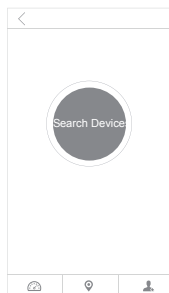


Cliccare il tasto di ricerca .




L'app cercherà il mezzo Airwheel nelle vicinanze. Cliccare sul modello che si vuole connettere tra quelli trovati.

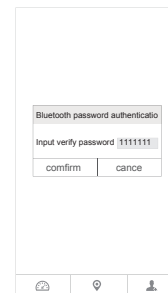


Immettere il codice di verifica 11111111 per connettersi.

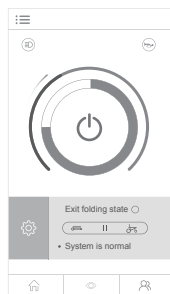


Attivare e entrare nella pagina iniziale.

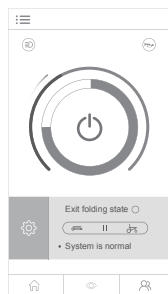


Cliccare sul tasto luci per accendere il fanale anteriore. Cliccare sul tasto clacson per far suonare il clacson.

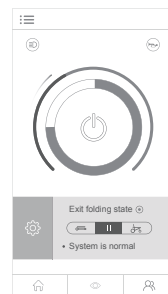


Quando H3T è spento, cliccare sul tasto di chiusura e il mezzo si richiuderà automaticamente. Cliccare il tasto di apertura e il mezzo si riaprirà automaticamente. Cliccare il bottone di disattivazione per disattivare la modalità di chiusura automatica.

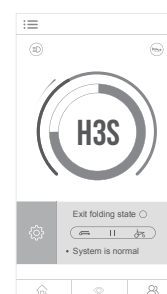


Quando sullo schermo compare l'icona di H3T significa che il mezzo è pronto per essere guidato.

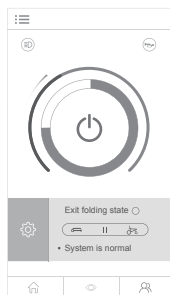


Cliccare sul tasto 'Menù principale' per aprire la barra laterale.

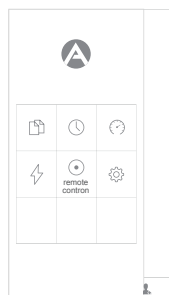

Cliccare il tasto nella barra laterale per aprire l'interfaccia del controllo remoto.

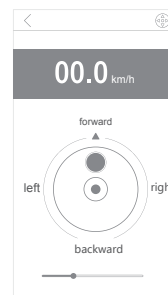

Spostare il bottone per controllare lo scooter elettrico e farlo andare in avanti, dietro e girare.

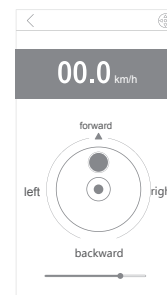

Spostare la barra per il controllo della velocità e cliccare sull'icona per passare alla modalità manuale.